



Opakované použitie ochranných RÚŠOK, MASIEK, RESPIRÁTOROV

Ak nemáte dostatočné množstvo OOPP na ochranu dýchacích ciest pre svojich zamestnancov, je možná dezinfekcia a opakované použitie už použitých OOPP.

Chirurgické rúška sú určené len na jedno použitie.

Bavlnené rúška vydezinfikujete tak, že ich operiete pri 90°C, prežehlíte alebo vyvaríte.

Respirátory FFP1, FFP2, FFP3 – sú taktiež na jedno použitie, no vzhľadom na danú situáciu, je možné ho nosiť dlhšie. Ak nevykazuje známky poškodenia. Respirátory je možné dezinfikovať rôznymi aerosólovými dezinfekčnými, virucídnymi a anti-bakteriálnymi sprejmi. Poprípade sa môžu dezinfikovať aj denaturovaným liehom alebo alkoholom.

Po nanosení dezinfekčného spreja je potrebné respirátor nechať vysušiť.

Nie je vhodné čistenie gélovými dezinfekčnými prostriedkami a taktiež pranie, alebo vyváranie – vysoké teploty môžu spôsobiť poškodenie respirátora.